

Инструкция

Отличная дезинфекция и обеспечение комфорта в течение всего дня.

Важно. Внимательно прочтите данную инструкцию по применению и сохраните ее.

Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE®RevitaLens предназначен для очистки, промывания, дезинфекции, удаления поверхностных отложений (в том числе липидов и белков), хранения и увлажнения любых мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Состав:

Алексидин 0,00016 %, поликватерниум-1 0,0003 %, борная кислота, натрия борат декагидрат, тетроник 904, динатрияэдетат (ЭДТА), тринатрия цитрат дигидрат, натрия хлорид, вода очищенная.

Не содержит бисфенол А, материалы животного и (или) человеческого происхождения, а также лекарственные средства.

Основные параметры: цвет - прозрачный, бесцветный раствор; без запаха; pH - 7,70-7,90.

ПОКАЗАНИЯ

Раствор используется для очищения, промывания, дезинфекции, хранения, удаления поверхностных отложений (в том числе липидов и белков) и повторного увлажнения мягких (гидрофильных) контактных линз, в соответствии с рекомендациями специалиста по коррекции зрения.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE®RevitaLens предназначен для личного индивидуального использования с соблюдением инструкции и мер предосторожности. В процессе очистки и дезинфекции линз при помощи многофункционального дезинфицирующего раствора ACUVUE®RevitaLens удаляются белковые и липидные отложения. Благодаря этому ваши линзы остаются гладкими и комфортными в использовании.

Очистка контактных линз:

• Перед тем как взять мягкие контактные линзы, обязательно вымойте и высушите руки.

1. Капните несколько капель раствора многофункционального дезинфицирующего ACUVUE®RevitaLens на каждую из сторон линзы.
2. Протрите обе стороны линзы в направлении от центра к краю в течение 2 - 4 секунд.

Промывание контактных линз:

1. Промойте каждую сторону линзы в течение 5 секунд или дольше раствором многофункциональным дезинфицирующим ACUVUE®RevitaLens.
2. Поместите линзы в надлежащие отделения контейнера для линз (голубое - для левой линзы, белое - для правой)
3. Заполните оба отделения свежим раствором многофункциональным дезинфицирующим ACUVUE®RevitaLens.
4. Закройте контейнер крышками и оставьте линзы в растворе не менее чем на 6 часов для дезинфекции и удаления белков и липидов.
5. Теперь линзы готовы к использованию. Промойте контейнер для линз раствором многофункциональным дезинфицирующим ACUVUE®RevitaLens и оставьте его на воздухе, пока он не высохнет.

Интенсивная очистка: Если на поверхности линзы имеется необычно много белковых отложений, понадобится более интенсивная очистка. Специалист по коррекции зрения может порекомендовать вам специальные таблетки для удаления белка.

Хранение контактных линз: Вы можете хранить линзы в закрытом контейнере для линз, заполненном раствором многофункциональным дезинфицирующим ACUVUE®RevitaLens в течение 30 дней.** Через 30 дней необходимо будет повторить процедуру очистки и дезинфекции. Только после этого линзы будут готовы к использованию. После вскрытия флакона раствор можно использовать в течение 90 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Противопоказано при наличии аллергии к какому-либо из компонентов изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Необходимо соблюдать все инструкции. Их несоблюдение может привести к серьезной инфекции или повреждению глаз.

В случае возникновения раздражения глаз немедленно снимите линзы и обратитесь к специалисту по коррекции зрения.

Запрещается капать раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE®RevitaLens непосредственно в глаза.

Используйте раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE®RevitaLens для мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Прежде чем перейти на другую систему ухода за линзами, необходимо проконсультироваться со своим специалистом по коррекции зрения.

Не используйте раствор в случае наличия у вас аллергии на любой из его компонентов.

Не носите линзы дольше, чем указано в инструкции по применению.

Поврежденные или высохшие линзы выбрасывайте.

При надетых контактных линзах старайтесь не применять аэрозоли.

Регулярно посещайте специалиста по коррекции зрения.

Храните раствор в недоступном для детей месте.

Всегда используйте раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE®RevitaLens вместе с поставляемым в комплекте нестерильным контейнером для линз.

Не используйте раствор, если отсутствует или повреждена защитная пленка.

Всегда используйте свежий раствор.

Перед тем как положить линзы в раствор, не забывайте провести механическую очистку по крайней мере в течение 2-4 секунд.

Не носите контактные линзы, когда принимаете душ или ванну, а также во время плавания.

Для увлажнения линз не пользуйтесь слюной и не кладите линзы в рот.

Не используйте раствор с истекшим сроком годности.

Во избежание загрязнения раствора не прикасайтесь кончиком флакона к любым поверхностям, пальцам и не касайтесь им глаз.

Не используйте для внутреннего применения.

Не промывайте линзы или контейнер для линз водопроводной водой и не храните линзы в водопроводной воде.

Хранение:

Сразу после использования флакон необходимо плотно закрыть.

Храните раствор при температуре от 5 °C до 25 °C.

Утилизация в связи с истечением срока годности:

Не используйте после истечения срока годности, указанного на этикетке и на упаковке

(2 года). Утилизируйте раствор, оставшийся по истечении 90 дней с момента вскрытия флакона. Утилизируйте раствор,

оставшийся в контейнере для контактных линз, и только после этого приступайте к очередной процедуре дезинфекции линз.

Регулярно выполняйте замену старого контейнера для линз на новый. Утилизация одноразовых изделий и изделий с истекшим

сроком годности производится в соответствии с местным/региональным/национальным/ международным законодательством.

Класс отходов для неиспользованного изделия - А. Класс отходов для использованного изделия - Б. Медицинское изделие не

оказывает воздействия на окружающую среду при применении в соответствии с инструкциями.